

InsideTeam e.V.

Verein zur Förderung des Rettungswesens und seiner Schnittstellen in Baden-Württemberg

Nutzungsbedingungen für die Übungsausstattung

Vorwort

Liebe Nutzer,

im Sinne der Zusammenarbeit zwischen dem Karl-Olga-Krankenhaus (federführend durch Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin) und uns als Verein InsideTeam e.V. stellen wir gerne die nachfolgende Übungsausstattung für die Simulation der (prä-)klinischen Notfallversorgung als auch der Simulation von einsatztaktischen Lagen zur Verfügung.

- > AED
- > Absaugeinheit (elektrisch)
- > Fahrtrage, manuell
- > Funkgeräte-Set inkl. Ladeeinheit und Bedienzubehör
- > Immobilisation (Schaufeltrage, Spineboard mit Zubehör, Vakuummatratze)
- > MAN-V-Tasche von PAX (FARBIG)
- > MAN-V-Tasche von Stavanger (WEIß)
- > Moderationskoffer (GRAU)
- > Tragetücher
- > Übungs-Kinder-Notfalltasche (GELB)
- > Übungs-Notfalltasche TRAUMA (GRÜN)
- > Übungs-Notfallrucksack AIRWAY / BREATHING (BLAU)
- > Übungs-Notfallrucksack BASIC (ROT)
- > Übungs-Notfallrucksack SAN-KLINIK (ROT)

Die Ausstattung / das Material ist zu einem großen Teil neu beschafft oder gesponsert worden und ist sehr hochwertig. Damit langfristig damit geübt werden kann, bitten wir um einen sorgsamen Umgang! Bitte beachtet auch unsere Hinweise auf den nachfolgenden Seiten!

Wir wünschen jedem viel Erfolg und den passenden Lerneffekt!

IT / Nutzungsbedingungen für die Übungsausstattung / EDN: D-9077 / Stand: 05.08.2024			
Erstellt: 16.08.2023 / RL	Geprüft: 00.00.0000 / AR	Freigegeben: 16.08.2023 / RL	

Grundsätze

Die nachfolgenden Hinweise sind jedem Nutzer per Kurzeinweisung zu vermitteln.

Anwendung / sinnvolle Nutzung

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich explizit um Übungsausstattung- bzw. -material handelt! Die Ausstattung / das Material ist so zu nutzen und einzusetzen, dass eine Weiternutzung möglichst gewährleistet werden kann. Die Gebrauchsanleitung ist zu beachten! Bei den Angaben in der Inhaltsliste handelt es sich um Mindestmengen. Es gelten weiter die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

Beschädigungen / Defekte

... insofern etwas beschädigt wurde, eine Beschädigung festgestellt wurde oder ein Defekt festgestellt wurde, so bitten wir unter Verwendung der nachfolgend genannten Formular (F_1002_Schadensanzeige-Schadensmeldung / F_1003_Störmeldung) das entsprechende Formular vollständig ausgefüllt und als Bild fotografiert per E-Mail (bei Beschädigungen: lager@insideteam.de / bei Störungen: stoerung@insideteam.de) einzureichen.

Einweisung / Unterweisung

... ist für eine vorherige Nutzung von Medizin-Produkten (Medizin-Produkte-Einweisung) / oder Ausstattung / Materialien (Unterweisung) erforderlich, um eine sachgerechte und fehlerfreie Nutzung zu gewährleisten.

Elektrische Geräte

... sind, insofern möglich, ohne die Nutzung von Akku oder Batterien anzuwenden. Ein laden ist nicht erforderlich, dies wird durch uns als Verein übernommen.

Nachfüllen

... insofern das Verbrauchsmaterial nicht noch einmal verwendet werden kann (sondern verworfen werden muss) so bitten wir unter Verwendung des Formular (F_401_Nachfüllung Ausstattung-Material) diesen vollständig ausgefüllt und als Bild fotografiert per E-Mail (lager@insideteam.de) einzureichen.

Persönliche Schutzausrüstung

... die vorhandene erweiterte Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Masken, Einmalhandschuhe) ist immer dann zu nutzen, wenn eine Gefahr durch eine auszuführende Tätigkeit ausgehen kann (Beispiele: Aufziehen von Medikamenten, Nutzung von Sprühflaschen usw.). Die Persönliche Schutzausrüstung ist (insofern nicht mehrfach nutzbar) immer als Original-Artikel nachzufüllen – Sie ist "scharfes Material".

Reinigung und Desinfektion

... der Ausstattung erfolgt nur mit den durch den Verein bereitgestellten und/oder zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

IT / Nutzungsbedingungen für die Übungsausstattung / EDN: D-9077 / Stand: 05.08.2024				
Erstellt: 16.08.2023 / RL	Geprüft: 00.00.0000 / AR	Freigegeben: 16.08.2023 / RL		

Spezielle Hinweise

Absaugeinheit (elektrisch)

Die elektrische Absaugeinheit wurde gebraucht und aufbereitet angeschafft. Sie ist vollfunktionsfähig mit dem Mangel einer verminderten Absaugleistung. Aufgrund unserer Zwecke (Übung) hat dieses Gerät keine Medizintechnische Kontrolle (MTK) / Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) nach der Medizin-Produkte-Betreiberverordnung.

Akku und Batterien

Jegliche Batterien und Akkus sollen nach Nutzung des elektrischen Geräts wieder aus dem Gerät entnommen werden und entsprechend mit dem Gerät verwahrt werden.

Ampullen

Glasampullen welche aufgebrochen werden müssen, um deren Inhalt zu entnehmen, sollen nur an der Soll-Bruchstelle und mit Hilfe einer unsterilen Kompresse geöffnet werden.

Beatmungsutensilien

Sämtliche Produkte die dazu dienen, eine Beatmung durchzuführen (Zubehör ist hier ebenfalls zugehörig) dürfen im Falle eines realen Übungspatienten aufgrund des Infektionsschutz nicht an diesem angewendet werden!

EZ-IO-BOHRER-Set

Der Bohrvorgang soll nach Möglichkeit aus Gründen der Akkuschonung (Einmal-Akku) nur simuliert werden! Der Bohrer muss nach jeder Nutzung in die dafür vorgesehene Halterung ordnungsgemäß gelagert werden – dies soll nochmals überprüft werden! Wichtiger Hinweis: Bei nicht korrekt eingelegtem Bohrer in die dafür vorgesehene Halterung besteht Brandgefahr durch eine mögliche Selbstauslösung!

Fahrtrage

Eine Unterweisung vor Nutzung ist zwingend erforderlich. Insofern keine gültige STK (Sicherheitstechnische Kontrolle) besteht, darf die Fahrtrage nicht für den Realbetrieb und/oder mit Mimen verwendet werden – lediglich mit Übungspuppen.

Funkgeräte-Set

Bitte beachtet das ausschalten der Funkgeräte nach Nutzungsende.

Medikamente / Sprühflaschen etc.

Die Nutzung und der Umgang mit Medikamenten wird aufgrund der Unfallverhütung (Gefährdung durch Hautkontakt mit abgelaufenen Flüssigkeiten und/oder Lösungen) nur mit Einmalhandschuhen erlaubt. Optional ist eine Schutzbrille zu tragen!

Sauerstoffflasche

Die Sauerstofflasche ist ungefüllt und ausgemustert. Mit der Sauerstoffflasche ist ebenso sorgsam umzugehen, wie mit einer realen Sauerstoffflasche.

IT / Nutzungsbedingungen für die Übungsausstattung / EDN: D-9077 / Stand: 05.08.2024			
Erstellt: 16.08.2023 / RL	Geprüft: 00.00.0000 / AR	Freigegeben: 16.08.2023 / RL	

Venenverweilkanülen

Insofern nicht zwingend der Vorgang simuliert werden muss wird darum gebeten, die zu verwendende Venenverweilkanüle an der entsprechenden Körperstelle der Übungspuppe mit einem Klebestreifen zu fixieren und so den geschaffenen Zugangsweg zu simulieren.